


KIT DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

Sur-blouse + Manchettes*



1 ENFILER LA SUR-BLOUSE

Déchirer les prédécoupes présentes sur les côtés sur 20 à 25 cm pour créer 2 trous pour les bras.

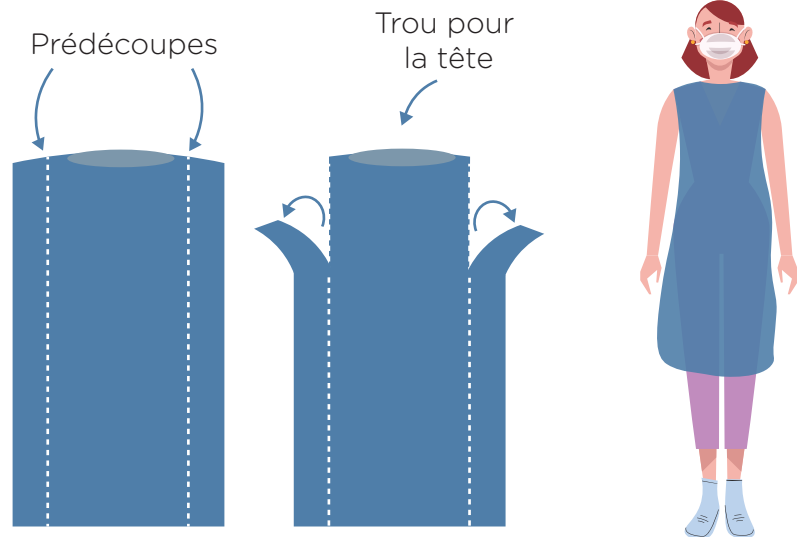


2 ENFILER LES MANCHETTES

2 manchettes liées par une bande plastique



- Retirer la partie prédécoupée au centre.
- Glisser les bras dans les 2 manchettes, une ouverture aux extrémités permet de passer les mains.
- Passer la bande plastique derrière la tête.

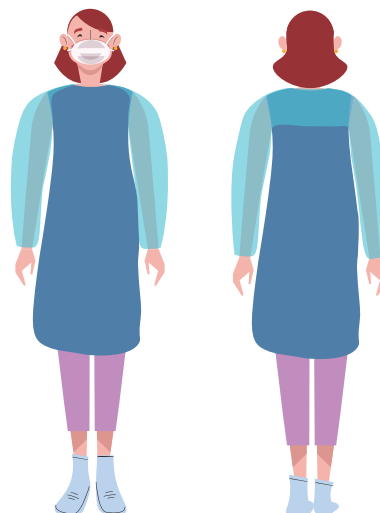

KIT DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL SOIGNANT Sur-blouse + Manchettes*



Pour retirer les manchettes :

- Déchirer la bande plastique dans le dos en tirant dessus.
- Retirer les manchettes de l'épaule vers le poignet en les retournant.

Pour retirer la sur-blouse :

- Déchirer la prédécoupe à droite ou à gauche en tirant dessus.
- Retirer la sur-blouse en tirant impérativement vers l'avant et vers le bas.

